

Bruksanvisning



**Medical Shower Filter
31 & 92 Day**

Tsafe

Medical Shower Filter 31 & 92 Day

Beskrivelse

Filteret i T-safe-familien av medisinske produkter er basert på hulfiberteknologi, og er spesifikt utviklet for å fjerne bakterier som, men ikke begrenset til, *Pseudomonas aeruginosa* og *Legionella pneumophila* fra kranvann for å forebygge sykdommer forårsaket av infeksjoner ved sykehus og helseinstitusjoner.

De medisinske produktene i T-safe-familien er ment for håndtering av mikromiljøet i skadet hud eller slimhinner, og dermed forebygge sykdom forbundet med bakterier. De medisinske T-safe-produktene er egnet for bruk ved sårpleie, i kar for behandling av brannskader, vannfødsel, håndvask, vanlig bad og flasking av drikkevann.

T-safe Medical Shower Filter 31 & 92 Day er en komplett enhet med 1/2" hann-gjenger. Produktet leveres med en flytbegrenser som beskytter filteret mot plutselige topper i vanntrykket.

T-safe Medical Shower Filter 31 & 92 Day holder effektivt tilbake bakterier i en maksimal periode på opptil henholdsvis 31 og 92 dager innenfor begrensningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Denne bruksanvisningen dekker følgende produkter:


Produkt	Artikkelnummer
Medical Shower Filter 31 Day	02-803310
Medical Shower Filter 92 Day	02-803330

Installasjon

Installer produktet direkte fra emballasjen, og pass på at filteret ikke kommer i kontakt med forurensningskilder før installasjon.


1

Den medfølgende pakningen er ment for dusjslangen, og erstatter den eksisterende pakningen. Dette må gjøres hver gang en ny T-safe-dusj monteres, for å sikre tett tilkobling.

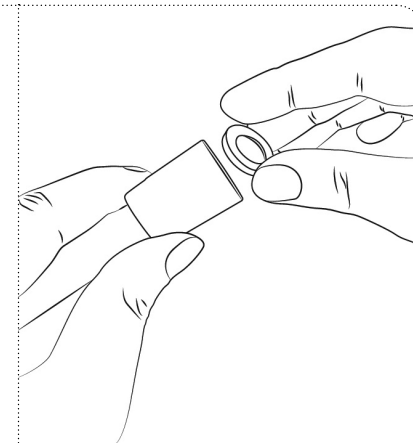

2

Fest dusjslangen godt til dusjen – den er nå klar for bruk.

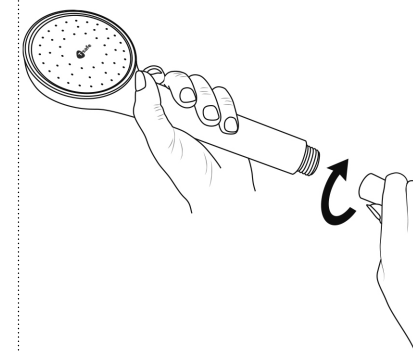

Rengjøring

Hvis det er etablert profesjonelle rengjøringsprosedyrer, kan de utvendige overflatene på filteret rengjøres med en ny engangsserviett, f.eks. med 1000 ppm klor. Vær ekstra nøye for å unngå at utløpet på filteret forurenses utilsiktet. Ikke koble fra filteret under rengjøring.

Eksposering for kjemisk og termisk vannbehandling

Filteret tolererer følgende kontinuerlige desinfeksjonsbehandlinger:

- 30 ppm klorindioksid
- 15 ppm fri klorin (hypokloritt)
- 10 ppm ozon
- 30 ppm hydrogenperoksid
- 10 ppm kloramin

Sjokkbehandling:

- Opptil 1000 ppm fri klorin i én time ved romtemperatur
- pH 12 i 1 time ved romtemperatur
- 1000 ppm pereddiksyre i 2 timer ved 60 °C

Filteret tåler termisk desinfeksjon inntil seks ganger i filterets levetid under følgende forhold: 70 °C i 5 minutter

Viktig: Filteret skal ikke settes i varmtvannsbad.

Kassering

Filteret kan kastes som vanlig avfall i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser under avfallskategori-nr. 180104 og i samsvar med EU-direktiv 75/442/EEC.

Oppbevaring – ubrukt filter

Produktet må oppbevares i temperaturer mellom 5 °C og 40 °C og ved en luftfuktighet på maks. 60 %. Utløpsdato: Se etiketten på emballasjen eller merkingen på produktet.

Forholdsregler

- Ikke bruk filteret hvis pakken er åpnet eller skadet, eller hvis filteret har synlige skader.
- Ikke koble fra filteret mens det er i bruk.
- Unngå mekaniske støt og ikke bank filteret med tunge eller metalliske gjenstander, ettersom dette kan skade filteret.
- Utløpet på filteret bør ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår.
- Ikke bruk filteret kontinuerlig med vanntemperaturer over 60 °C. Optimal arbeidstemperatur er fra 10 °C til 45 °C.
- Filteret tåler ikke trykk over 5 bar.
- Hvis filteret utsettes for høyt vanntrykk, fører det til at filteret kollapser (plutselig reduksjon i vannstrømmen). Filteret må kastes hvis dette skjer.
- Filteret kan ikke "tilbakespyles".

- Kontaminasjonsnivået og mengden filterblokkerende partikler og stoffer i vannet kan redusere filterets levetid.
- Filteret skal ikke skylles eller vaskes i oppvaskmaskin eller autoklav.
- Kast filteret hvis holdbarhetsdatoen er utløpt.
- Ikke modifierer eller utfør endringer på filteret.

MERK

- Ikke bruk vannet til kontaktlinser.
- Vannkvaliteten er ikke egnet til farmasøytisk bruk.
- Filteret endrer ikke vannets smak, lukt eller kjemiske sammensetning, og endrer ikke konsentrasjonen av salter, metaller, kalk, kjemikalier, pesticider eller fargestoffer.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com