

Guide d'installation

Adaptateur de panneau de douche Delabie

90-001871

Utilisation prévue

L'adaptateur pour panneau de douche est conçu pour faciliter l'installation du filtre Robinet et Douche Murale Médical T-safe sur une gamme de panneaux/pommeaux de douche Delabie.

L'adaptateur pour panneau de douche est compatible avec les panneaux de douche Delabie suivants :

- **SPORTING 2**
- **TEMPOSOFT**
- **TEMPOMIX**
- **SECURITYTHERM**
- **Colonne de douche mécanique**


L'adaptateur pour panneau de douche est compatible avec les pommeaux de douche Delabie suivants :

- **Pommeau de douche ROUND**
- **Pommeau de douche TONIC JET**
- **Pommeau de douche GYM**

T-safe A/S


Gydevang 1
3450 Allerød, Danemark

+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com

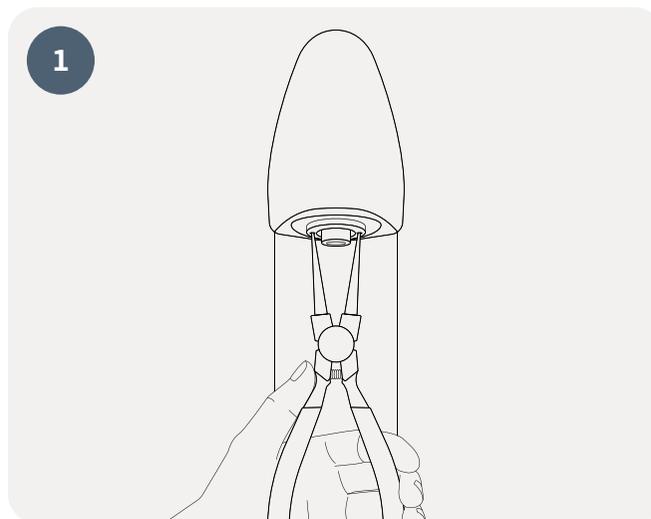


Retirez la buse de pulvérisation du panneau/pommeau de douche Delabie à l'aide d'une pince à anneau de retenue.

Conservez la buse en lieu sûr pour remontage ultérieur, si nécessaire.

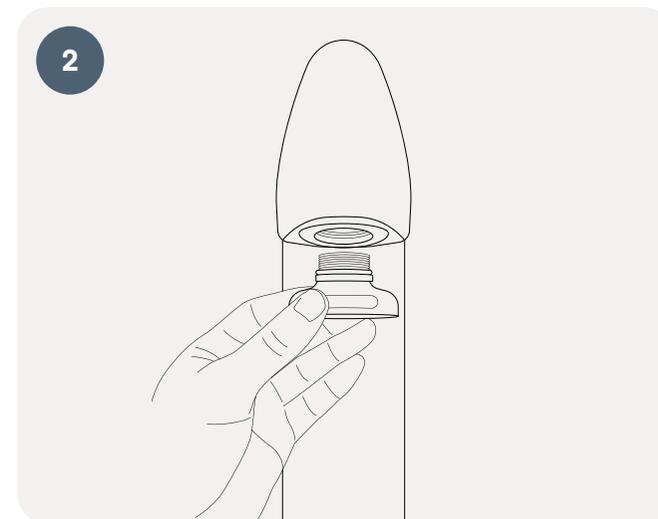

Insérez l'adaptateur dans le panneau/pommeau de douche Delabie en le vissant à la main sans le serrer.

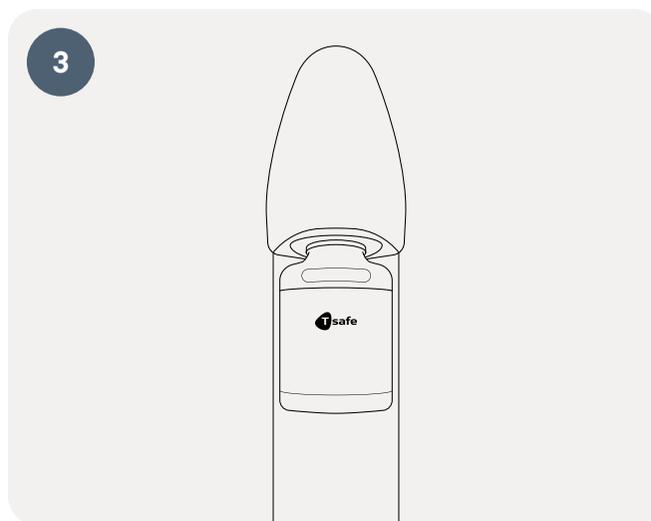

Poussez l'entrée du Filtre Robinet et Douche Murale Médical complètement vers le haut dans l'adaptateur.