

Guide d'installation

Adaptateur de panneau de douche Presto

90-001878 + 90-001875

Utilisation prévue

L'adaptateur de panneau de douche est destiné à faciliter l'installation du Filtre Robinet et Douche Murale Médical T-safe sur différents panneaux de douche Presto.

Cet adaptateur de panneau de douche est compatible avec les panneaux de douche Presto suivants :

- **DL 400**
E SENSOR, SE, E TOUCH
- **PRESTOTEM 2**
SENSOR, TOUCH, P50, ALPA, MASTERMIX
MONO/BI-COMMANDE
- **DL 300 S**
- **DL 800 S**


T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Danemark


+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
www.t-safe.com




Enlevez la plaque de diffusion du pommeau de douche Presto en desserrant la vis Allen centrale. Conservez ces pièces en lieu sûr pour remontage ultérieur si nécessaire.

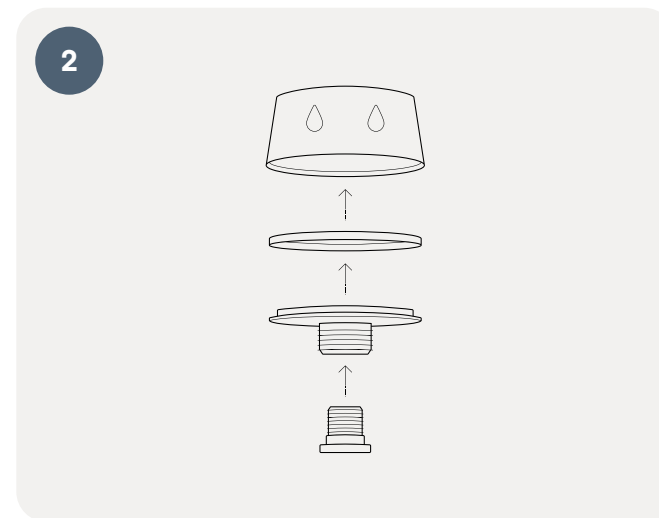

Placez le joint en silicone transparent, l'adaptateur et la vis Allen suivante dans la bague du pommeau de douche Presto.

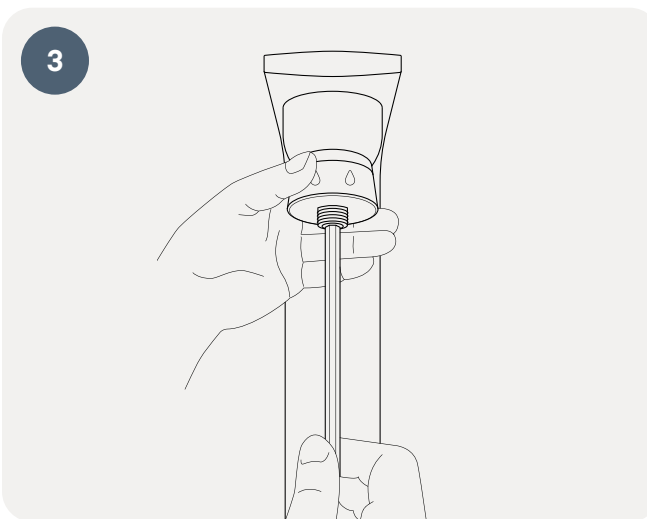

Poussez l'adaptateur et la bague du pommeau de douche en place et fixez-les avec la vis creuse centrale à l'aide d'une clé hexagonale propre de 8 mm. Serrez fermement.

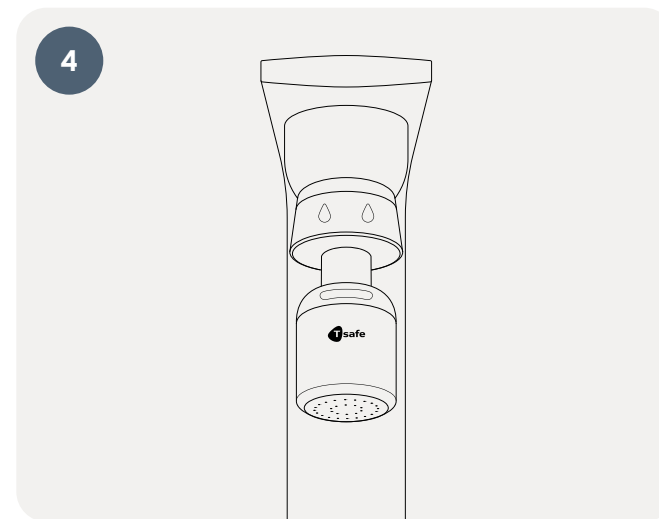

Fixez l'adaptateur 90-001875 au filetage 1/2" et poussez l'entrée du Filtre Robinet et Douche Murale Médical complètement vers le haut dans l'adaptateur.