



Gebruiksaanwijzing NL

Handdouche Filter Aegis



Omschrijving

Het filter van het T-safe Pro Waterfiltratie-assortiment is gebaseerd op hollevezelmembraantechnologie en is specifiek ontworpen om bacteriën zoals, maar niet beperkt tot, *Legionella pneumophila* uit leidingwater te verwijderen om infecties in commerciële omgevingen te voorkomen.

T-safe Handdouche Filter Aegis is voorzien van een mannelijke ½" schroefdraad. De filters worden geleverd met een waterstroomregelaar, die de filters beschermt tegen plotselinge waterdrukpieken.


T-safe Handdouche Filter Aegis houdt bacteriën effectief vast voor een maximale periode van maximaal 92 dagen, binnen de gebruiksbeperkingen zoals hierin beschreven.

Deze IFU omvat de volgende producten

Product	Productcode
Handdouche Filter Aegis	02-803400
Vervangend Filter	02-000300
Dummy-patroon	02-000122

Installatie


1

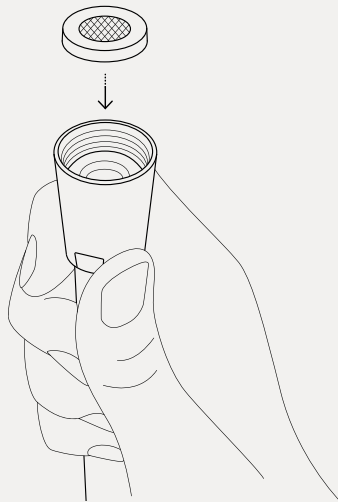

Verwijder de oude pakking van de doucheslang en plaats de nieuwe pakking die in de verpakking zit.


Deze stap moet elke keer worden uitgevoerd wanneer een nieuw T-safe-filter wordt geïnstalleerd om een veilige en lekvrije verbinding te garanderen.

2

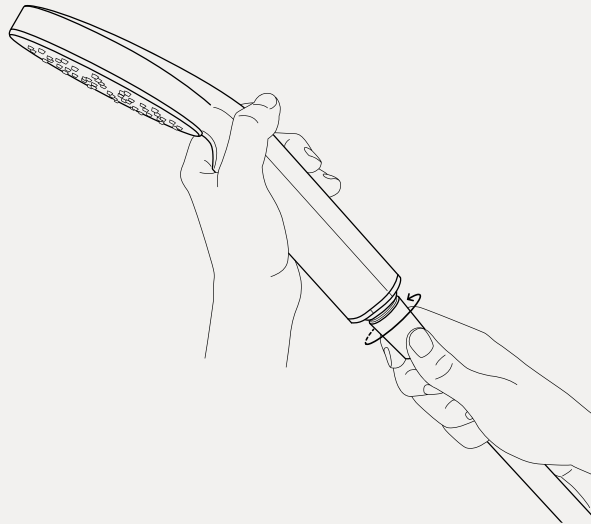

Draai het douchefilter met de hand vast aan de slang.

3

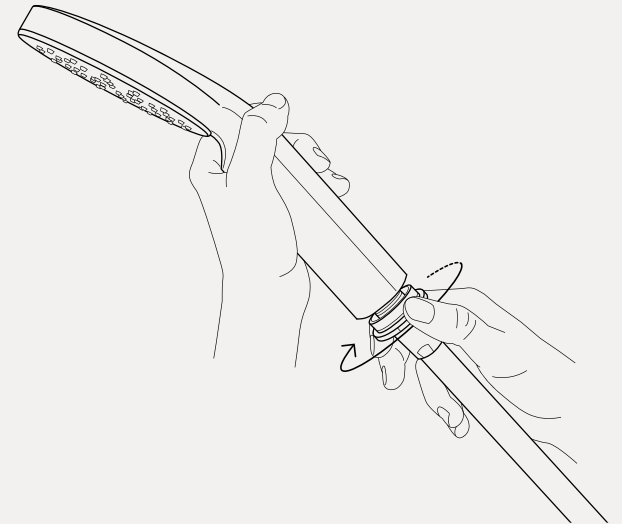


Schroef de sluitring aan de onderkant van het douchefilter los door deze met de hand tegen de klok in te draaien.

4




Verwijder de douchehendel van het filter. Zorg er vervolgens voor dat het filter stevig aan de slang is vastgedraaid, zodat er geen waterlekage optreedt.

5

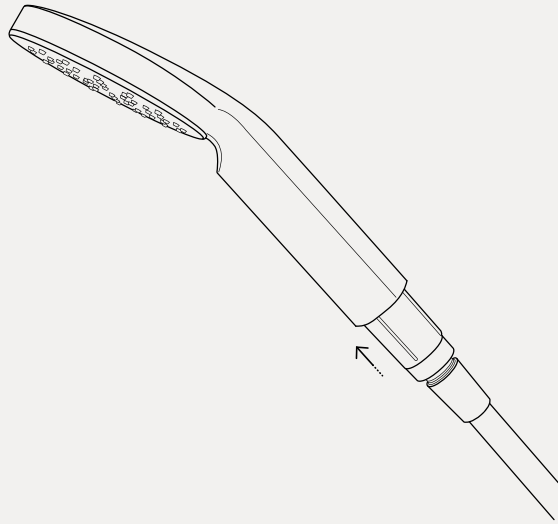

Duw het filter terug in de douchehendel.


6

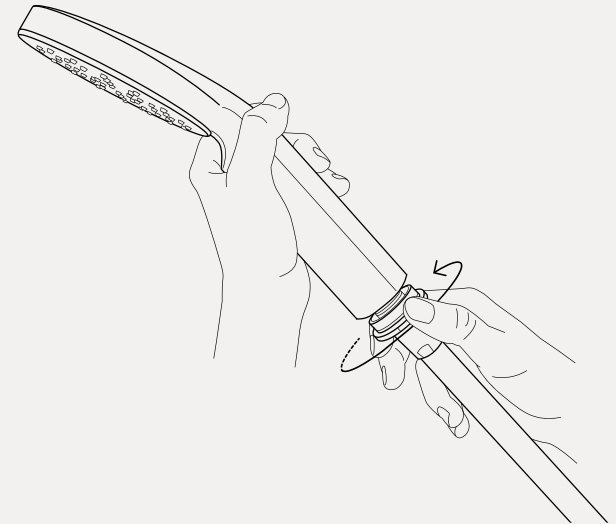

Bevestig de sluitring weer aan de douchehendel door deze met de klok mee te draaien om het filter stevig op zijn plaats te houden.

Vervanging van filter of installatie van dummy

1

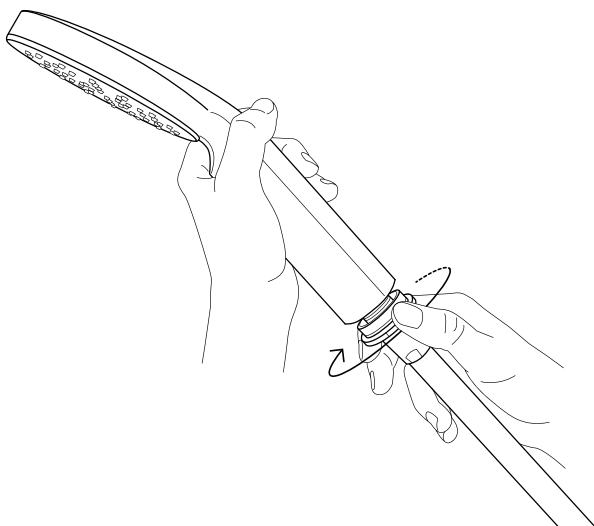

Schroef de sluitring aan de onderkant van het douchefilter los door deze met de hand tegen de klok in te draaien.


2



Verwijder de douchehendel van het filter. Vervang het gebruikte filter door een nieuwe of installeer een dummy cartridge indien ongefilterd water gewenst is.


Belangrijk: Vervang tijdens deze stap altijd de pakking in de doucheslang.

3

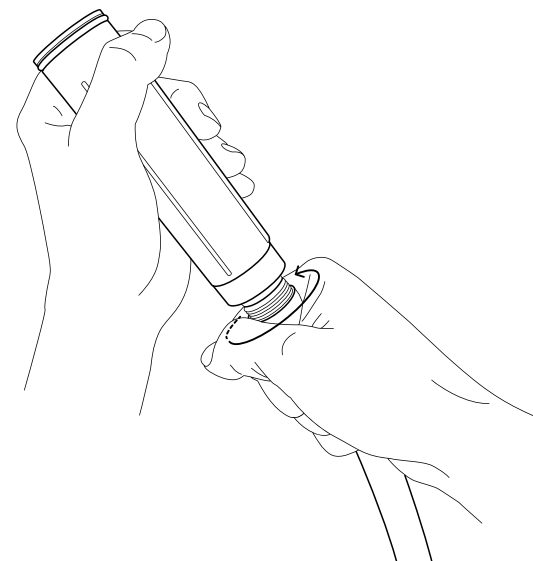


Zorg ervoor dat het filter stevig aan de slang is vastgedraaid om waterlekage te voorkomen.

4

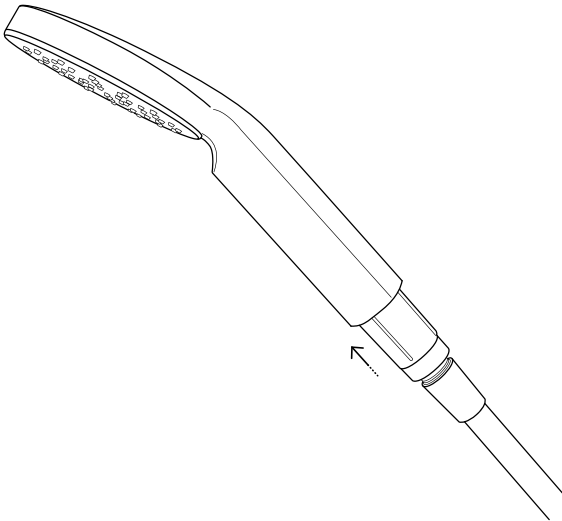

Duw het filter terug in de douchehendel.

5

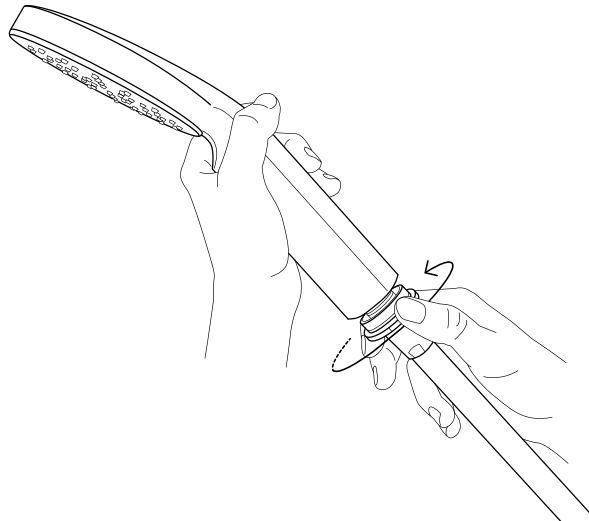

Bevestig de sluitring weer aan de douchehendel door deze met de klok mee te draaien om het filter stevig op zijn plaats te houden.

Informatie

Reiniging

Als er professionele reinigingsprocedures gebruikt worden, mogen de externe oppervlakken van de hele filter met een nieuw wegwerpdoekje gereinigd worden. Er moet extra op worden gelet dat de uitlaten van de filter niet verontreinigd worden. Maak de filter tijdens het reinigen niet los.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

Blootstelling aan chemische en thermische waterbehandeling

De filter kan de volgende voortdurende desinfectiebehandelingen verdragen:

- 30 ppm chloordioxide
- 15 ppm vrije chloor (hypochloriet)
- 10 ppm ozon
- 30 ppm waterstofperoxide
- 10 ppm chloramine

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5° C en 40° C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60%. Uiterste gebruiksdatum: zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Schokbehandeling

- tot 1.000 ppm vrije chloor gedurende 1 uur bij kamertemperatuur
- pH 12 gedurende 1 uur bij kamertemperatuur
- 1.000 ppm perazijnzuur gedurende 2 uur bij 60° C

De filter kan tijdens de levensduur tot wel 6 keer thermische desinfectie verdragen onder de volgende omstandigheden: 70° C gedurende 5 minuten.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60° C. Het optimale bereik voor gebruik is 10° C - 45° C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal deze stukgaan (plotselinge toename van de waterstroom). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter kan niet tegen de werkingsrichting in worden uitgespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurst

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denemarken

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com