



Instrucción de Uso ES

Chrome Wall Shower Filter



Descripción

El Chrome Wall Shower Filter de la gama de Filtración de Agua Profesional T-safe está expresamente diseñado para eliminar del agua corriente bacterias como *Legionella pneumophila* y *Pseudomonas aeruginosa*, entre otras, con el fin de prevenir infecciones en espacios comerciales.


El filtro retiene eficazmente las bacterias un tiempo máximo de 92 días, con las limitaciones de uso aquí descritas.

La presente instrucción de uso cubre los siguientes productos

Artículo	Código
Chrome Wall Shower Filter	02-803150
Filtro de Repuesto	02-000143
Cartucho de Simulación	02-000145


Instalación

1

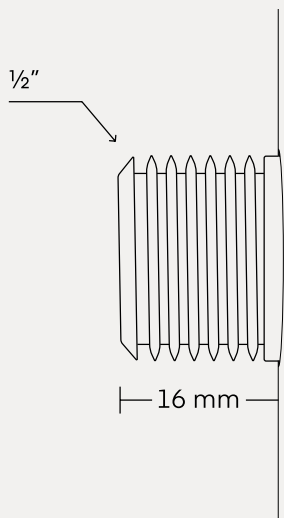


Compruebe que la tubería de agua comunicante sobresale un máximo de 16 mm de la pared.

2

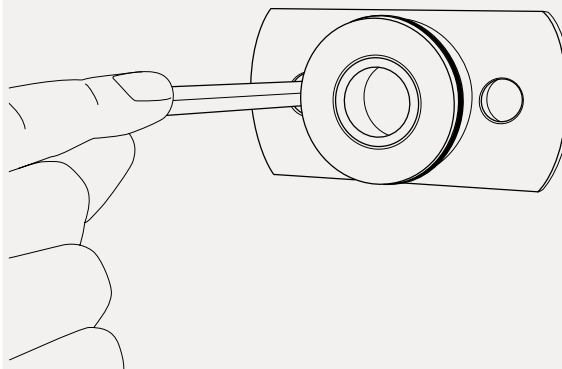


Para empezar, coloque la placa mural en la tubería. A continuación, marque en la pared los puntos donde quiere taladrar los agujeros. Después de hacer las marcas, quite la placa mural.

3

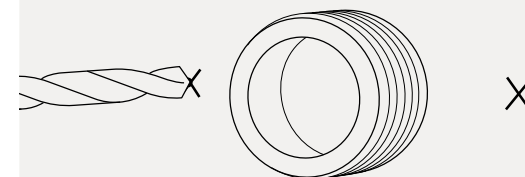


Utilice una broca de Ø6 mm para hacer los agujeros en los puntos marcados en la pared. Introduzca en los orificios los tacos facilitados.

4

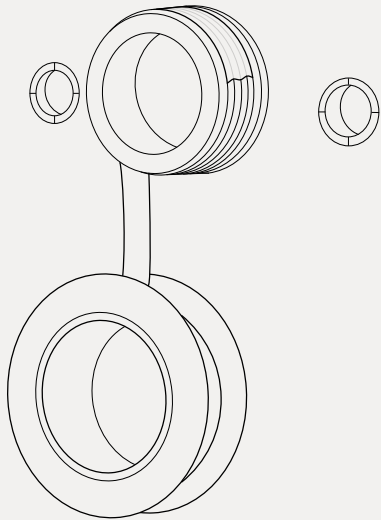


Para garantizar una instalación segura, aplique alrededor de la tubería un material de sellado adecuado.

5

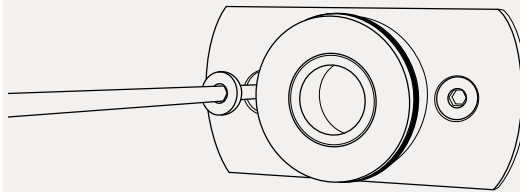

Vuelva a colocar la placa mural en la pared y fíjela con los tornillos suministrados con el producto.


6

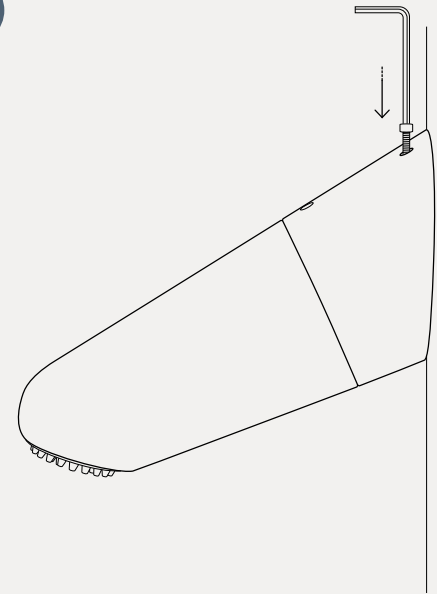


Coloque el cabezal de ducha en la placa mural. Para fijarlo bien, apriete el tornillo situado en la parte superior o inferior, según el modelo del soporte.

Instalación del filtro de repuesto y cartucho de simulación

Instale el producto inmediatamente después de extraerlo del envase y asegúrese de que el filtro no entre en contacto con ninguna fuente de contaminación antes de instalarlo.

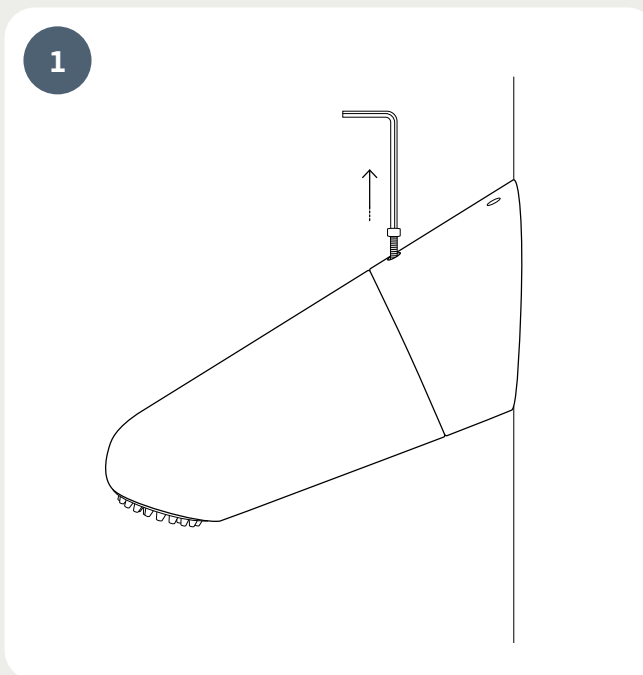


Para empezar, suelte el tornillo situado en la parte inferior o superior, según el modelo.

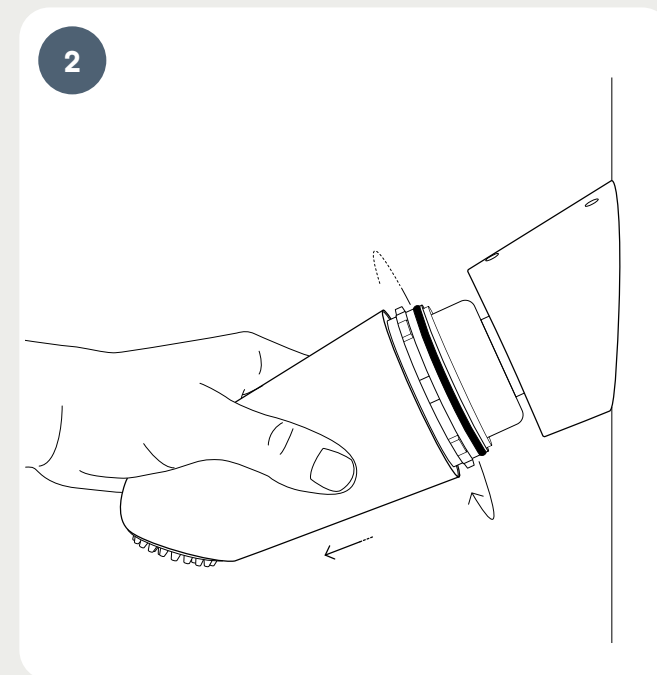


Para quitar el cabezal de ducha, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj mientras lo va aflojando y tirando de él.

3

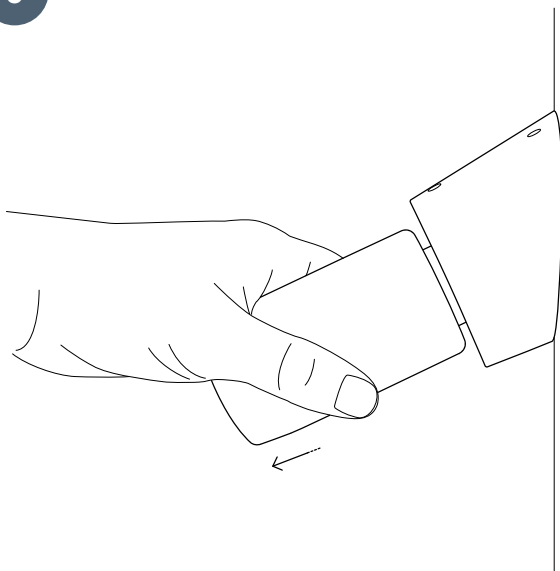


A continuación, gire y tire del filtro para soltarlo. Deseche el filtro siguiendo los métodos habituales de eliminación.

4

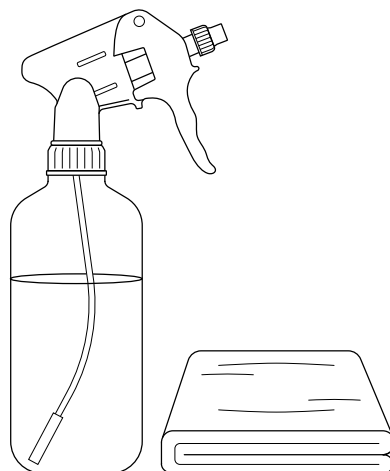


Asegúrese de limpiar, descalcificar y desinfectar el cabezal y la base de la ducha según las directrices locales.

5

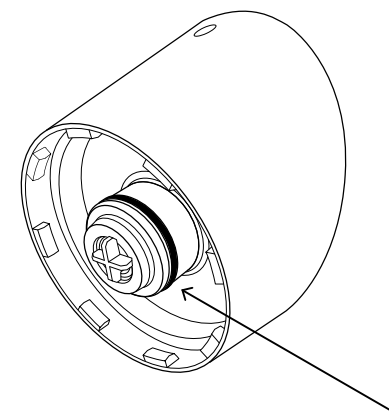


Vuelva a colocar la junta tórica en el soporte.

6

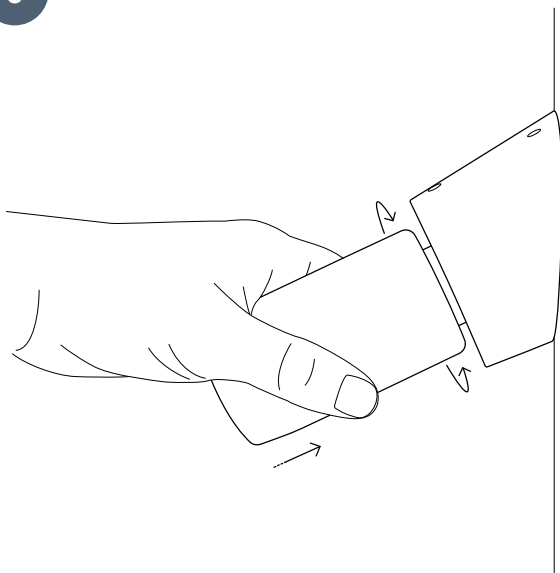

Para instalar el nuevo filtro, empújelo y gírelo al mismo tiempo.

7

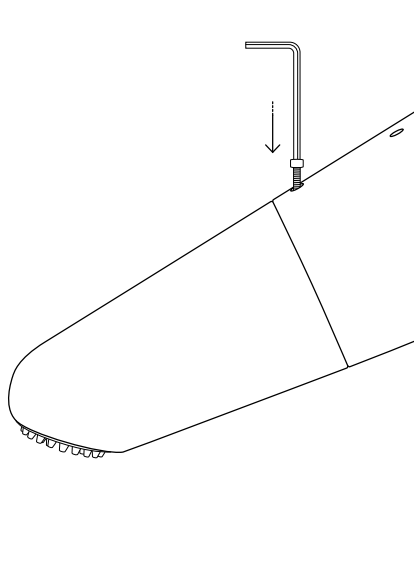

Vuelva a fijar el cabezal de ducha en el soporte girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Para fijar bien el cabezal de ducha, apriete el tornillo situado en la parte superior o inferior, según el modelo.

Información

Limpieza y desinfección de superficies

Si existen procedimientos de limpieza profesional, las superficies externas del filtro pueden limpiarse utilizando una toallita desechable nueva. Debe prestarse especial atención para evitar la contaminación de cualquier salida del filtro. No desconectar el filtro durante la limpieza.

Los filtros de agua T-safe son compatibles con los desinfectantes para superficies y productos de limpieza habituales, salvo con los desinfectantes a base de cloro, debido a su superficie cromada. Para la limpieza y desinfección, la carcasa del filtro puede sumergirse en una solución de ácido cítrico de hasta 500.000 ppm.

Almacenamiento – Filtro no encargado

El producto debe almacenarse a una temperatura entre 5 °C y 40 °C con una humedad máxima del 60 %. Fecha de caducidad: Ver la etiqueta del envase o el marcado del producto.

Eliminación

El filtro puede desecharse con los residuos normales conforme a lo dispuesto en la normativa local aplicable con el número de categoría de residuo 180104 y conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE de la Unión Europea.

Las piezas metálicas de latón sin plomo pueden limpiarse, descalcificarse y desinfectarse para reutilizarse con un cartucho del filtro de repuesto. Cuando deseche las piezas metálicas, asegúrese de reciclarlas correctamente siguiendo las directrices locales.

Tolerancia a los desinfectantes para sistemas de agua

Los filtros de agua T-safe son compatibles con los desinfectantes habituales para sistemas de agua. Esto se ha validado mediante ensayos de integridad de los filtros tras su exposición a los siguientes desinfectantes, en las concentraciones y con los tiempos de contacto indicados:

- 30 ppm de dióxido de cloro, combinados con 200 mg/L de sólidos en suspensión, en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 30 ppm de peróxido de hidrógeno en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 15 ppm de cloro libre en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 10 ppm de ozono en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 10 ppm de cloramina en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 1000 ppm de cloro libre mediante un tratamiento de choque de 1 hora
- 50 ppm de ácido hipocloroso (HOCl) mediante un tratamiento de choque de 2 horas
- 50 ppm de dióxido de cloro mediante un tratamiento de choque de 2 horas
- 3500 ppm de peróxido de hidrógeno mediante un tratamiento de choque de 6 horas
- 3000 ppm de peróxido de hidrógeno estabilizado con plata mediante un tratamiento de choque de 14 horas
- una solución acuosa con pH 12 mediante un tratamiento de choque de 1 hora
- 1000 ppm de ácido peracético a 60 °C mediante un tratamiento de choque de 2 horas

Precauciones

- No utilizar el filtro si el envase está abierto o dañado, o el filtro está visiblemente dañado
- No desconectar el filtro durante el periodo de uso
- Evitar impactos mecánicos y no golpear el filtro con objetos pesados o metálicos, ya que podría resultar dañado
- La salida del filtro no debe entrar en contacto directo con la piel ni el pelo
- El filtro no debe utilizarse de forma continuada con agua a una temperatura que supere los 60 °C. Rango operativo óptimo de 10 °C – 45 °C
- El filtro no tolera una presión por encima de los 5 bares
- Si el filtro se somete a una presión excesivamente elevada llega a colapsar (disminución repentina del flujo del agua). A continuación, desechar el filtro
- No enjuagar el filtro
- El nivel de contaminación y la cantidad de partículas y sustancias obstructoras presentes en el agua pueden reducir la vida útil del filtro
- No enjuagar ni limpiar el filtro en un lavavajillas o un autoclave
- Desechar el filtro cuando supere la fecha de caducidad
- No modificar ni realizar cambios en el filtro ni el adaptador
- Importante: No calentar el filtro al baño maría

Nota

- No utilizar el agua como líquido para las lentillas
- La calidad del agua no es idónea para el uso farmacéutico
- El filtro no alterará el sabor ni el olor o la composición química del agua y no provocará ningún cambio en la concentración de sales, metales, cal, sustancias químicas, pesticidas y tintes

No se asumirá ninguna responsabilidad por erratas o errores tipográficos.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com