



Instructions d'utilisation FR

Filtre en Ligne Chromé



Description

Le Filtre en Ligne Chromé de la gamme T-safe Pro Water Filtration est spécialement conçu pour éliminer des bactéries telles que, entre autres, la *Legionella pneumophila* et la *Pseudomonas aeruginosa* de l'eau du robinet, afin de prévenir les infections dans les environnements commerciaux et publics.

Le filtre est idéal pour les distributeurs d'eau potable et distributeurs automatiques, les machines à glaçons ainsi que les conduites d'alimentation des robinets et douches anti-ligatures.

Le Filtre En Ligne Chromé T-safe est un système complet équipé de deux raccords filetés mâles ½". Le filtre est fourni avec un limiteur de débit, qui le protège contre les pics de pression soudains. Le filtre est conçu pour être installé aussi près que possible de la sortie. Plus le filtre est installé loin de la sortie, plus le risque de prolifération bactérienne en aval du filtre est élevé.


Le Filtre en Ligne Chromé T-safe retient efficacement les bactéries pendant une période maximale de 92 jours, dans les limites d'une utilisation conforme à celle décrite dans le présent document.

Les présentes instructions d'utilisation couvrent les produits suivants

Référence	Code
Filtre en Ligne Chromé	02-803236
Filtre de Remplacement	02-000242


Installation

1

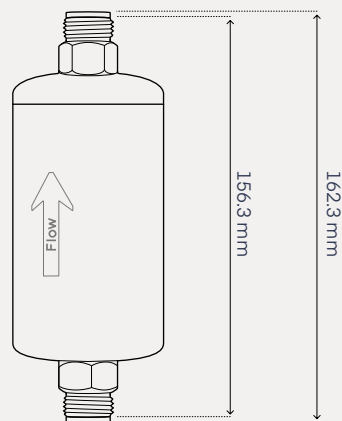


Vérifiez que la distance d'installation entre les raccords d'entrée et de sortie correspond à la longueur du filtre.

2

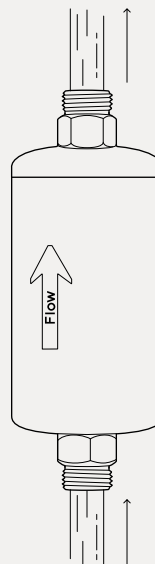


Assurez-vous que le filtre est orienté dans le sens du débit d'eau dans la conduite.

3

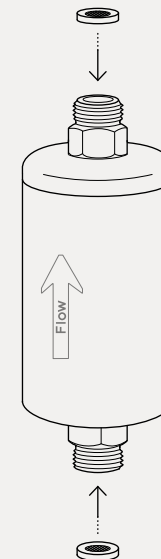

Installez le filtre en utilisant les joints de 3 millimètres (1/2") fournis aux deux extrémités afin d'assurer une étanchéité parfaite.


4

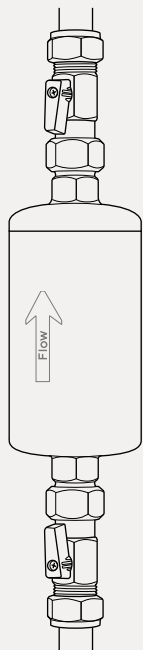


Serrez fermement les raccords d'entrée et de sortie.

Installation du filtre de remplacement

Installez le produit pris directement dans son emballage et assurez-vous que le filtre n'entre en contact avec aucune source de contamination avant son installation.

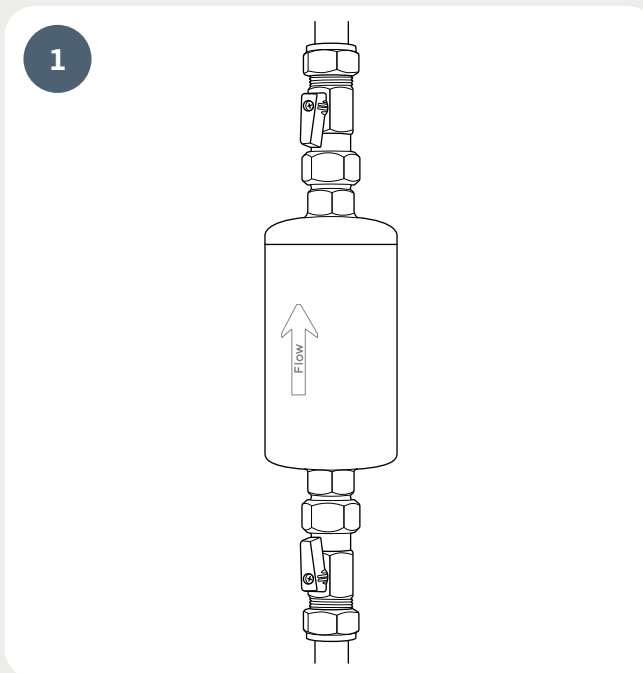


Retirez tout le boîtier du filtre de l'installation.

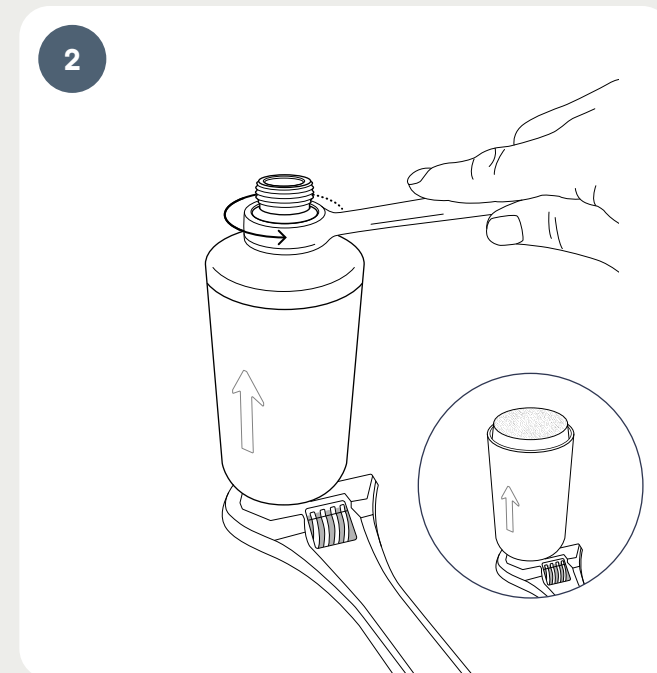


Ouvrez le boîtier du filtre. Vérifiez que la sortie est orientée vers le haut, puis dévissez la petite pièce de sortie. Il est possible que de l'eau résiduelle s'écoule du boîtier lorsque vous l'ouvrez.

3

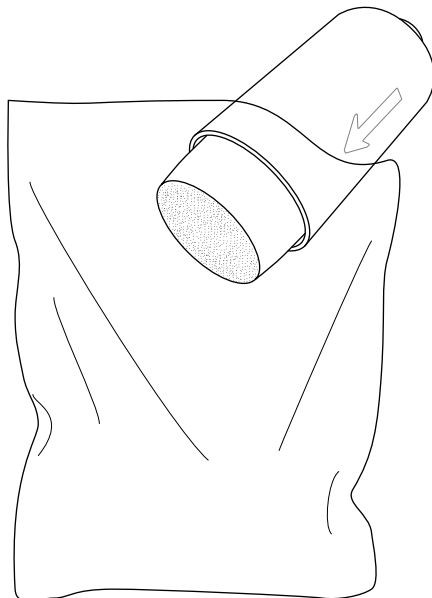


Retirez la cartouche filtrante usagée. Placez-la directement dans un sac poubelle sans manipulation supplémentaire et jetez-la conformément à la réglementation locale.

4

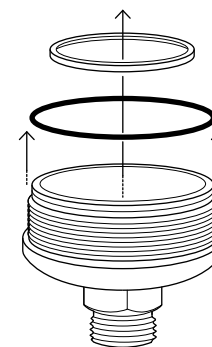

Retirez puis jetez le grand joint ($\varnothing 42 \times 3$ mm) et le joint torique noir ($\varnothing 50 \times 2$ mm) de la petite pièce de sortie.

5

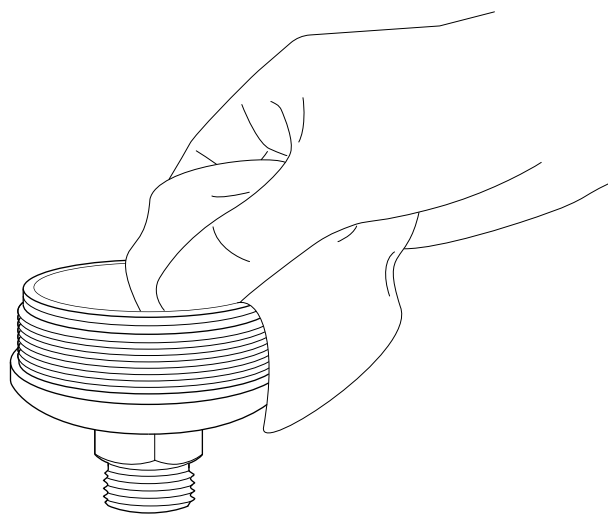


Portez des gants de protection appropriés avant de procéder au nettoyage et à la désinfection. Nettoyez et désinfectez l'intérieur de la petite pièce de sortie (ou des deux parties du boîtier, le cas échéant) à chaque fois que vous remplacez la cartouche filtrante. Veillez à ce que toutes les matières organiques et tous les résidus soient entièrement éliminés. Utilisez un chiffon non pelucheux et non abrasif et/ou une brosse douce pour éliminer les traces de contaminations visibles. Désinfectez à l'aide de l'un des produits suivants :

- une lingette à base de chlore ou d'éthanol (1000 ppm) ;
- un spray à base d'éthanol à 75–100 % ;
- un désinfectant équivalent adapté aux surfaces chromées


Prenez soin de ne pas salir la surface d'étanchéité entre le joint blanc et le petit embout de sortie. Laissez les composants sécher complètement avant de les réassembler.

6

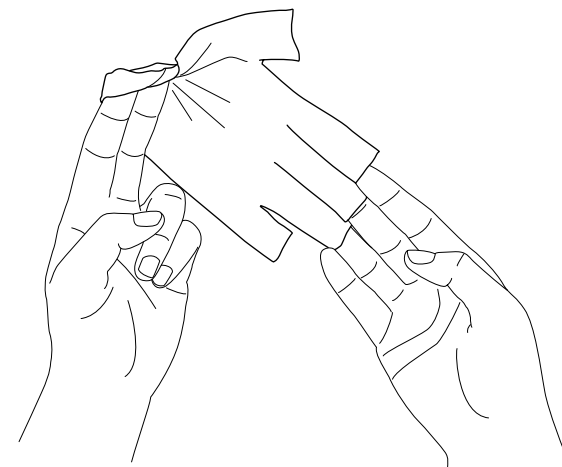


Changez de gants avant de manipuler de nouveaux composants.

7

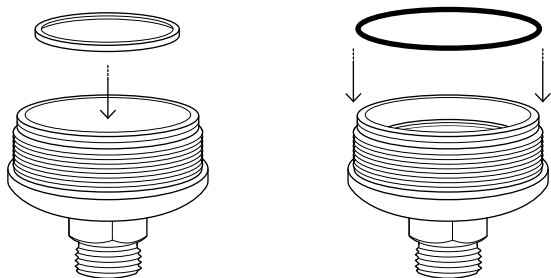


Installez un nouveau joint ($\varnothing 42 \times 3$ mm) à l'intérieur de la petite pièce de sortie et un nouveau joint torique noir ($\varnothing 50 \times 2$ mm) à l'extérieur de la petite pièce de sortie.

8

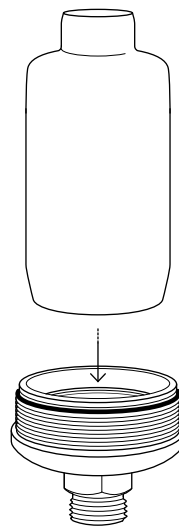


Installez la nouvelle cartouche filtrante en l'insérant dans la petite pièce de sortie.

9

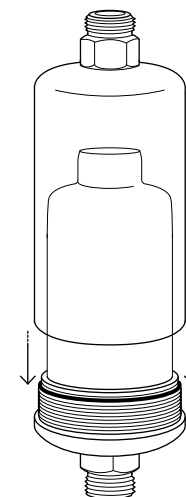


Réassemblez le boîtier de filtre dans son intégralité.

10

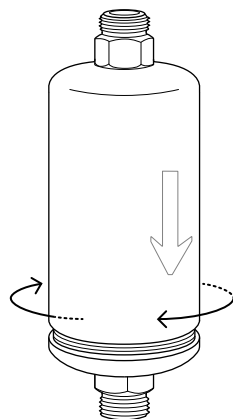


Tournez le boîtier à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour engager les filetages.

11

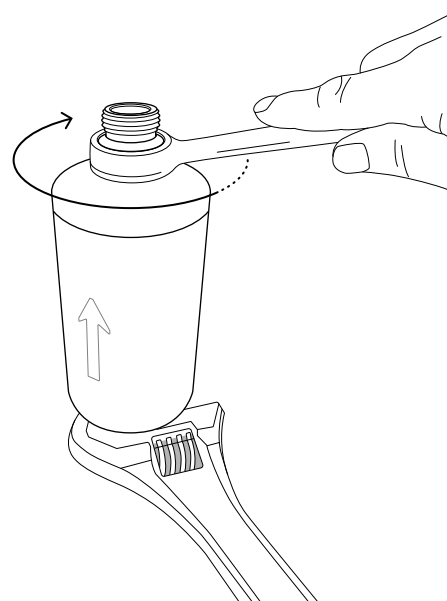

Utilisez des clés pour fixer le boîtier solidement.

12

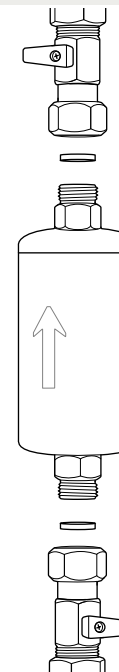

Réinstallez le filtre en utilisant de nouveaux joints de 3 millimètres (1/2"). Assurez-vous que le filtre est installé dans le bon sens du débit d'eau.

Information

Nettoyage et désinfection des surfaces

Si des procédures de nettoyage professionnel sont en place, les surfaces extérieures du filtre doivent être nettoyées à l'aide d'une lingette jetable neuve avec, par exemple. Veillez à ne contaminer aucun embout du filtre, afin d'éviter toute contamination.

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants de surface et les produits de nettoyage courants, à l'exception des désinfectants à base de chlore, en raison de leur surface chromée.

Pour le nettoyage et la désinfection, le boîtier du filtre peut être immergé dans de l'acide citrique jusqu'à 500 000 ppm.

Rangement – filtre non utilisé

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à une humidité de max. 60 %. Date d'expiration : consultez l'étiquette sur l'emballage ou le marquage sur le produit.

Élimination

La cartouche filtrante et les composants non métalliques peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires, conformément aux réglementations locales en vigueur en vertu du numéro de catégorie de déchets 180104 et conformément à la directive européenne 75/442/CEE.

Tolérance aux désinfectants pour réseaux d'eau

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants courants pour les réseaux d'eau. Ce résultat a été validé par des tests d'intégrité des filtres après exposition aux désinfectants suivants, aux concentrations et pour la durée de contact indiquées:

- Dioxyde de chlore à 30 ppm associé à 200 mg/L de matières en suspension, en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 30 ppm de peroxyde d'hydrogène en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 15 ppm de chlore libre en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm d'ozone en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm de chloramine en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 1000 ppm de chlore libre lors d'un traitement de choc d'une heure
- 50 ppm d'acide hypochloreux (HOCl) lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 50 ppm de dioxyde de chlore lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 3500 ppm de peroxyde d'hydrogène lors d'un traitement de choc de 6 heures
- 3000 ppm de peroxyde d'hydrogène stabilisé à l'argent lors d'un traitement de choc de 14 heures
- solution aqueuse à pH 12 lors d'un traitement de choc d'une heure
- 1000 ppm d'acide peracétique à 60 °C lors d'un traitement de choc de 2 heures

Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas le filtre si l'emballage est ouvert ou abîmé ou si le filtre présente des dommages visibles
- Ne déconnectez pas le filtre pendant la période d'utilisation
- Évitez les chocs mécaniques et ne heurtez pas le filtre avec des objets lourds ou métalliques, au risque de l'endommager
- L'embout du filtre ne doit pas entrer en contact direct avec la peau ou les cheveux
- Le filtre ne doit pas être utilisé en permanence avec de l'eau à plus de 60 °C. La plage de température optimale en fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C
- Le filtre n'est pas conçu pour supporter une pression supérieure à 5 bars
- Si le filtre est soumis à une pression d'eau trop élevée, il risque de se casser (diminution soudaine du débit d'eau). Le filtre doit alors être jeté
- Le filtre n'est pas compatible avec le « rétrolavage »
- Le niveau de contamination et la quantité de particules et de substances présentes dans l'eau qui sont susceptibles de bloquer le filtre risquent de diminuer la durée de vie de ce dernier
- Le filtre ne doit pas être rincé ou nettoyé au lave-vaisselle ou dans un autoclave
- Le filtre doit être jeté si la date d'expiration est dépassée
- Ne modifiez ni le filtre ni l'adaptateur et n'effectuez aucun changement dessus
- Important : Le filtre ne peut pas être placé dans un bain d'eau chaude

Remarque

- N'utilisez pas l'eau pour des lentilles de contact
- La qualité de l'eau ne convient pas à une utilisation pharmaceutique
- Le filtre n'altère pas le goût, l'odeur ou la composition chimique de l'eau et ne modifie pas la concentration en sels, métaux, tartre, produits chimiques, pesticides et colorants

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de coquilles.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com