



Instrucción de Uso ES

Filtro de Ducha Easy-Fix



Descripción

El Filtro de Ducha Easy-Fix T-safe de la gama de Filtración de Agua Profesional T-safe está expresamente diseñado para eliminar del agua corriente bacterias como *Legionella pneumophila* y *Pseudomonas aeruginosa*, entre otras, con el fin de prevenir infecciones en espacios comerciales.

El Filtro de Ducha Easy-Fix T-safe es una pieza completa que incluye una rosca hembra de ½". El filtro se suministra con un regulador de caudal de agua que lo protege de los picos repentinos de presión.


El filtro retiene eficazmente las bacterias un tiempo máximo de 92 días, con las limitaciones de uso aquí descritas.

La presente instrucción de uso cubre los siguientes productos

Artículo	Código
Filtro de Ducha Easy-Fix	02-092031
Filtro de Repuesto (solo filtro)	02-000200
Filtro de Repuesto (pieza completa)	02-000201

Instalación de la unidad completa

1

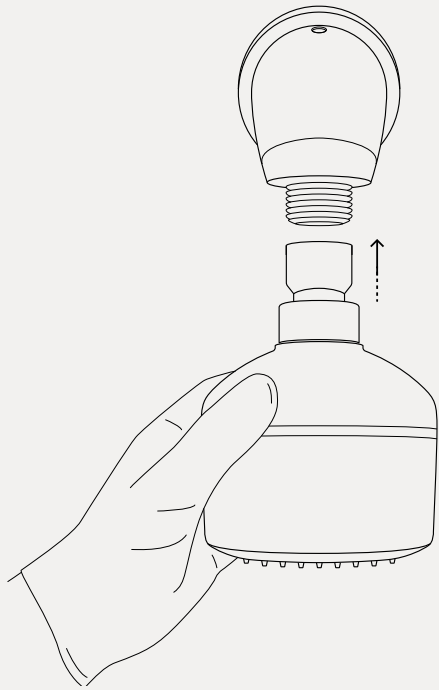


Montar la unidad completa en una rosca estándar de ½" (macho). Hay que asegurarse de que esté bien apretado para que no se produzcan fugas.

Instalación del filtro de repuesto (solo filtro)

Instale el producto inmediatamente después de extraerlo del envase y asegúrese de que el filtro no entre en contacto con ninguna fuente de contaminación antes de instalarlo.




Separe la cubierta de la carcasa.
Utilice la herramienta adjunta y gire hacia la izquierda el anillo de cierre (en el sentido de las agujas del reloj).

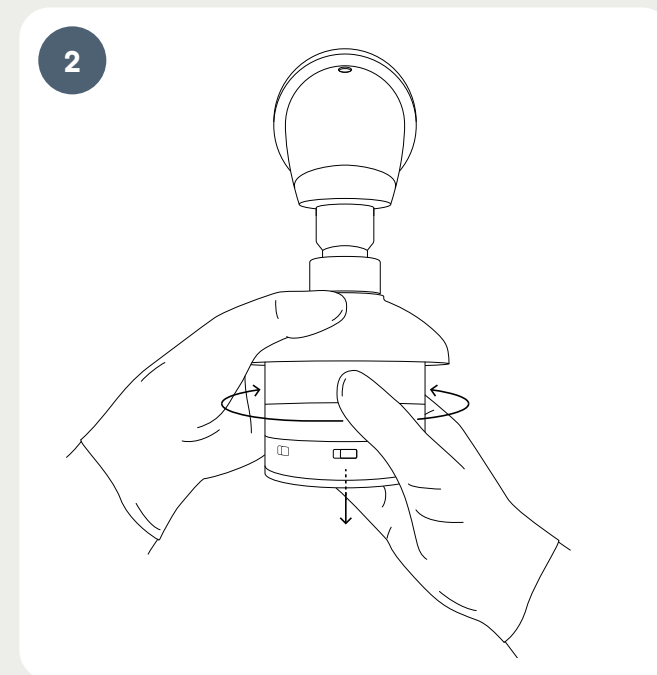


Es sencillo retirar el filtro usado girándolo y tirando de él suavemente. Asegúrese de desechar correctamente el filtro usado.

3

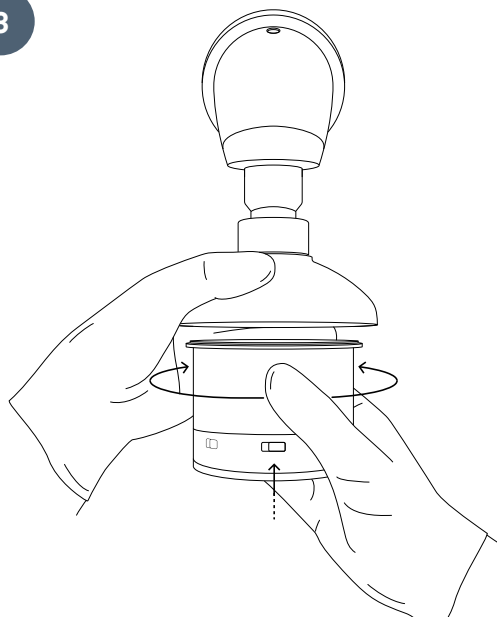


Coloque el nuevo filtro presionándolo y girándolo.

4

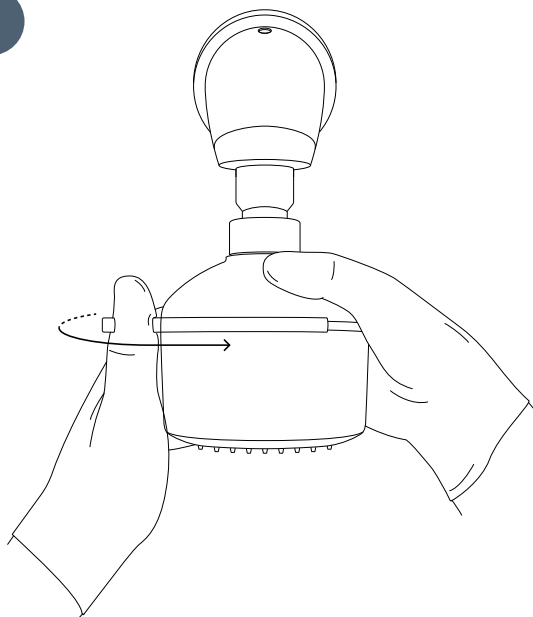


Vuelva a unir la cubierta a la carcasa. Asegure la cubierta a la carcasa girando el anillo de cierre en sentido contrario a las agujas del reloj.

Instalación del filtro de repuesto (pieza completa)

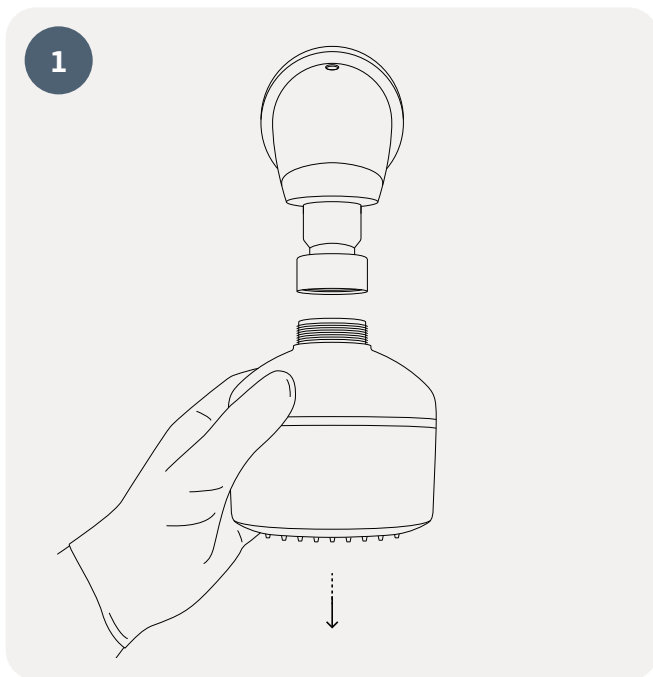

Retire el filtro usado de la junta desenroscando toda la pieza.

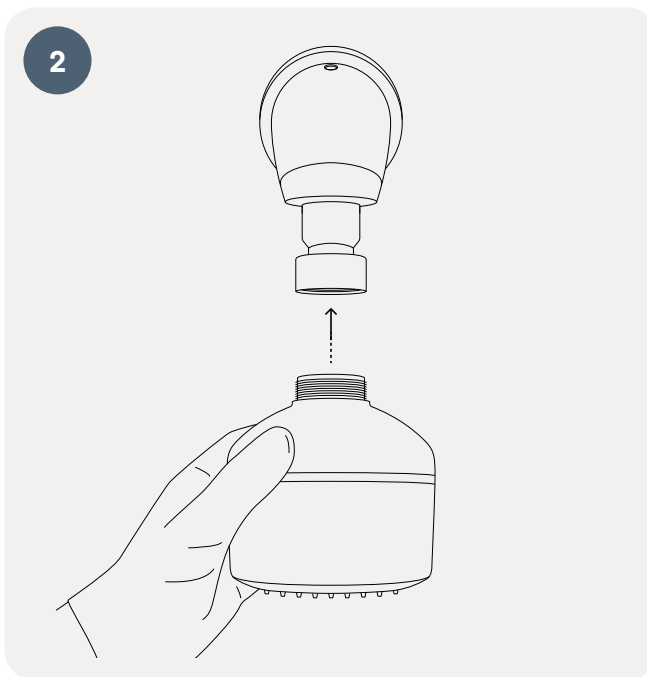

Coloque la nueva unidad de filtro completa. Asegúrese de apretarla para evitar fugas.

Información

Limpieza y desinfección de superficies

Si existen procedimientos de limpieza profesional, las superficies externas del filtro pueden limpiarse utilizando una toallita desechable nueva. Debe prestarse especial atención para evitar la contaminación de cualquier salida del filtro. No desconectar el filtro durante la limpieza.

Los filtros de agua T-safe son compatibles con los desinfectantes para superficies y productos de limpieza habituales, salvo con los desinfectantes a base de cloro, debido a su superficie cromada. Para la limpieza y desinfección, la carcasa del filtro puede sumergirse en una solución de ácido cítrico de hasta 500.000 ppm.

Almacenamiento – Filtro no encargado

El producto debe almacenarse a una temperatura entre 5 °C y 40 °C con una humedad máxima del 60 %. Fecha de caducidad: Ver la etiqueta del envase o el marcado del producto.

Eliminación

El filtro puede desecharse con los residuos normales conforme a lo dispuesto en la normativa local aplicable con el número de categoría de residuo 180104 y conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE de la Unión Europea.

Las piezas metálicas de latón sin plomo pueden limpiarse, descalcificarse y desinfectarse para reutilizarse con un cartucho del filtro de repuesto. Cuando deseche las piezas metálicas, asegúrese de reciclarlas correctamente siguiendo las directrices locales.

Tolerancia a los desinfectantes para sistemas de agua

Los filtros de agua T-safe son compatibles con los desinfectantes habituales para sistemas de agua. Esto se ha validado mediante ensayos de integridad de los filtros tras su exposición a los siguientes desinfectantes, en las concentraciones y con los tiempos de contacto indicados:

- 30 ppm de dióxido de cloro, combinados con 200 mg/L de sólidos en suspensión, en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 30 ppm de peróxido de hidrógeno en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 15 ppm de cloro libre en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 10 ppm de ozono en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 10 ppm de cloramina en funcionamiento continuo durante todo el ciclo de vida
- 1000 ppm de cloro libre mediante un tratamiento de choque de 1 hora
- 50 ppm de ácido hipocloroso (HOCl) mediante un tratamiento de choque de 2 horas
- 50 ppm de dióxido de cloro mediante un tratamiento de choque de 2 horas
- 3500 ppm de peróxido de hidrógeno mediante un tratamiento de choque de 6 horas
- 3000 ppm de peróxido de hidrógeno estabilizado con plata mediante un tratamiento de choque de 14 horas
- una solución acuosa con pH 12 mediante un tratamiento de choque de 1 hora
- 1000 ppm de ácido peracético a 60 °C mediante un tratamiento de choque de 2 horas

Precauciones

- No utilizar el filtro si el envase está abierto o dañado, o el filtro está visiblemente dañado
- No desconectar el filtro durante el periodo de uso
- Evitar impactos mecánicos y no golpear el filtro con objetos pesados o metálicos, ya que podría resultar dañado
- La salida del filtro no debe entrar en contacto directo con la piel ni el pelo
- El filtro no debe utilizarse de forma continuada con agua a una temperatura que supere los 60 °C. Rango operativo óptimo de 10 °C – 45 °C
- El filtro no tolera una presión por encima de los 5 bares
- Si el filtro se somete a una presión excesivamente elevada llega a colapsar (disminución repentina del flujo del agua). A continuación, desechar el filtro
- No enjuagar el filtro
- El nivel de contaminación y la cantidad de partículas y sustancias obstructoras presentes en el agua pueden reducir la vida útil del filtro
- No enjuagar ni limpiar el filtro en un lavavajillas o un autoclave
- Desechar el filtro cuando supere la fecha de caducidad
- No modificar ni realizar cambios en el filtro ni el adaptador
- Importante: No calentar el filtro al baño maría

Nota

- No utilizar el agua como líquido para las lentillas
- La calidad del agua no es idónea para el uso farmacéutico
- El filtro no alterará el sabor ni el olor o la composición química del agua y no provocará ningún cambio en la concentración de sales, metales, cal, sustancias químicas, pesticidas y tintes

No se asumirá ninguna responsabilidad por erratas o errores tipográficos.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com