



Instructions d'utilisation FR

# Filtre Douchette Cuisine



# Description

---

Le Filtre Douchette Cuisine de la gamme Filtration d'Eau Pro T-safe est spécialement conçu pour éliminer de l'eau du robinet les bactéries telles que, mais sans s'y limiter, la *Legionella pneumophila* et la *Pseudomonas aeruginosa*, afin de prévenir les infections dans les environnements commerciaux.


Le filtre retient efficacement les bactéries pendant une période maximale de 92 jours, dans les limites d'utilisation décrites dans le présent document.

## Les présentes instructions d'utilisation couvrent les produits suivants

| Référence                | Code      |
|--------------------------|-----------|
| Filtre Douchette Cuisine | 02-803200 |
| Filtre de Remplacement   | 02-000153 |
| Cartouche factice        | 02-000106 |


# Installation

1

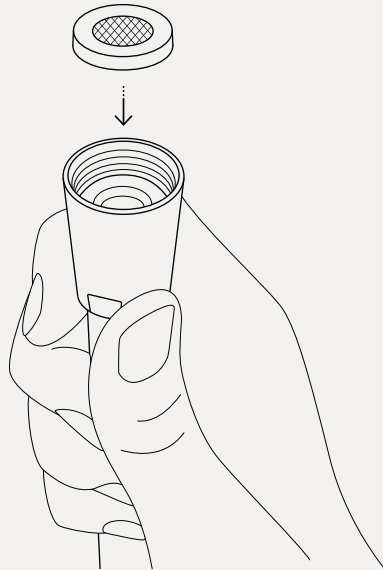

Le joint d'étanchéité fourni est destiné au tuyau et doit remplacer le joint d'étanchéité précédemment installé. Cette opération est effectuée à chaque fois qu'un nouveau filtre T-safe est installé, afin de s'assurer que le raccordement est bien fixé.


2

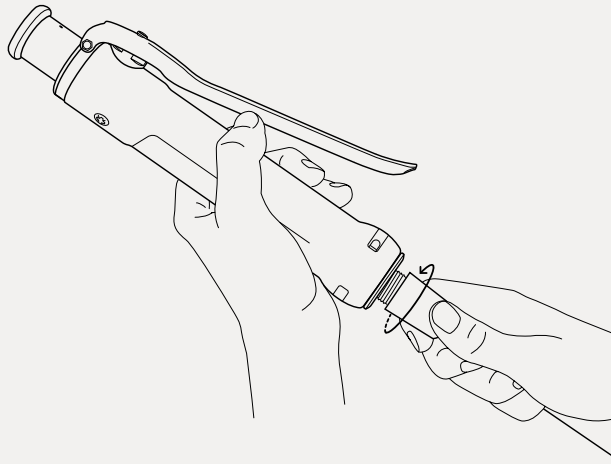


Fixez fermement le tuyau au Filtre Douchette Cuisine. Il est maintenant prêt à être utilisé!

# Filtre de remplacement ou installation de la cartouche factice

Installez le produit pris directement dans son emballage et assurez-vous que le filtre n'entre en contact avec aucune source de contamination avant son installation.

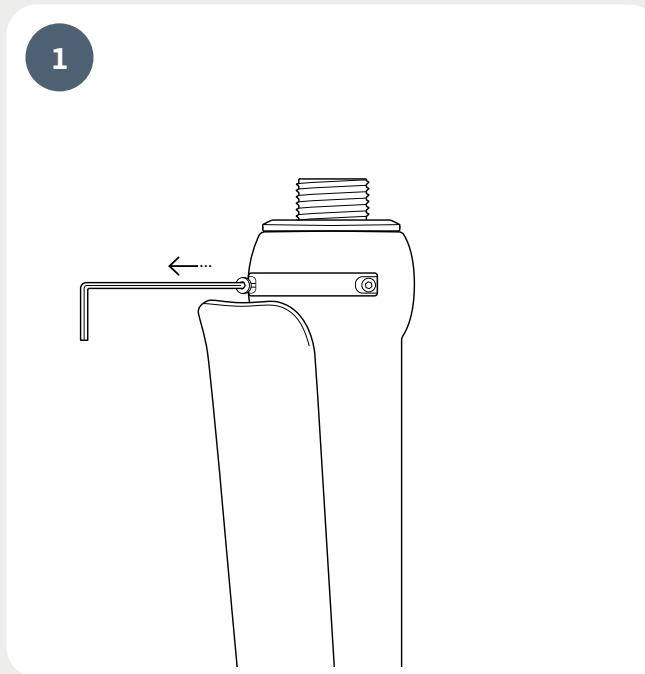


Commencez par desserrer les deux vis situées au bas du Filtre Douchette Cuisine. Pour ce faire, utilisez une clé Allen d'une taille de 1,5 mm.

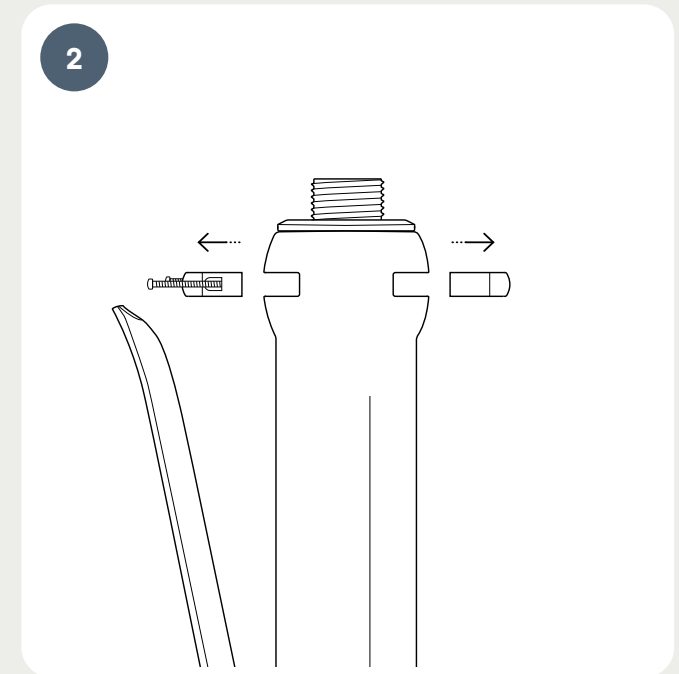


Retirez les deux cliquets de verrouillage de chaque côté pour détacher le filtre.

3

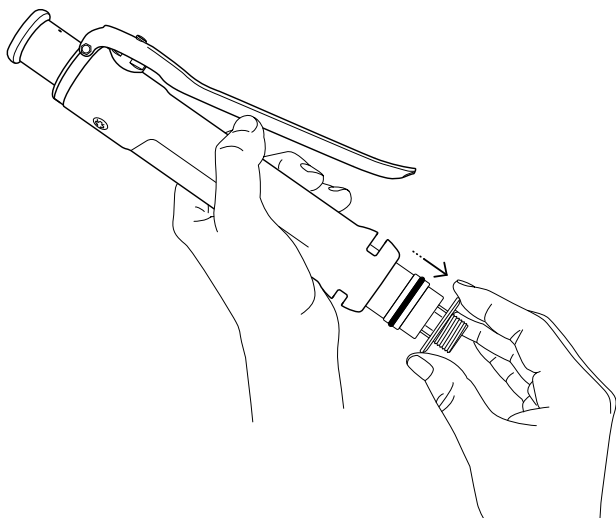


Retirez le filtre de la poignée et jetez-le en respectant les procédures normales de traitement des déchets.

4

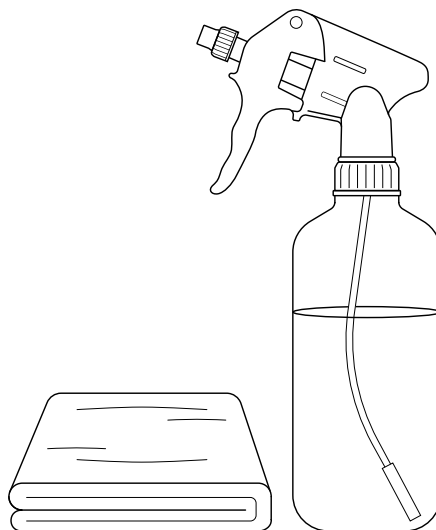


Assurez-vous de nettoyer, de détartrer et de désinfecter le boîtier du douchette cuisine conformément aux directives locales.

5

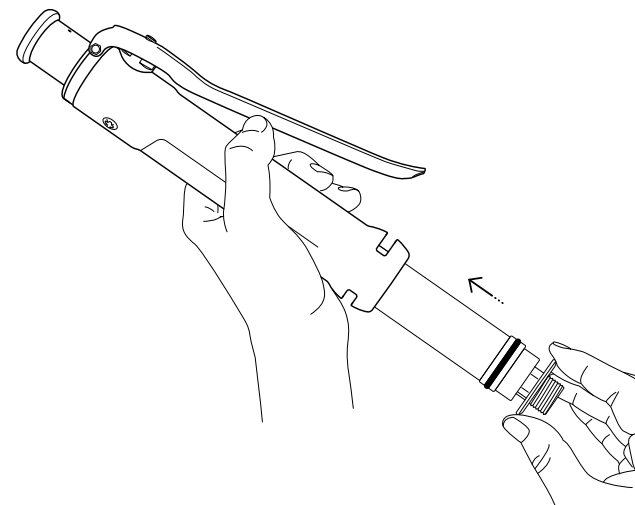

Insérez le nouveau filtre ou la cartouche factice.

6

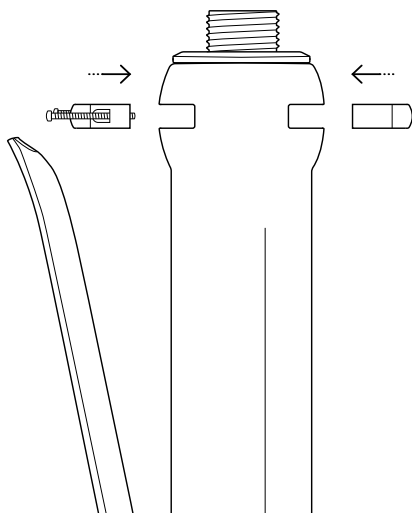

Insérez les cliquets de verrouillage et serrez les vis à l'aide d'une clé Allen d'une taille de 1,5 mm.

7



Remplacez le joint d'étanchéité précédemment installé dans le tuyau de forme conique et fixez fermement ce dernier au Filtre Douchette Cuisine. Il est maintenant prêt à être utilisé!

# Information

## Nettoyage et désinfection des surfaces

Si des procédures de nettoyage professionnel sont en place, les surfaces extérieures du filtre doivent être nettoyées à l'aide d'une lingette jetable neuve avec, par exemple. Veillez à ne contaminer aucun embout du filtre, afin d'éviter toute contamination. Ne déconnectez pas le filtre pendant le nettoyage.

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants de surface et les produits de nettoyage courants, à l'exception des désinfectants à base de chlore, en raison de leur surface chromée.

Pour le nettoyage et la désinfection, le boîtier du filtre peut être immergé dans de l'acide citrique jusqu'à 500 000 ppm.

## Rangement – filtre non utilisé

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à une humidité de max. 60 %. Date d'expiration : consultez l'étiquette sur l'emballage ou le marquage sur le produit.

## Élimination

La cartouche filtrante et les composants non métalliques peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires, conformément aux réglementations locales en vigueur en vertu du numéro de catégorie de déchets 180104 et conformément à la directive européenne 75/442/CEE.

Les composants métalliques en laiton sans plomb peuvent être nettoyés, détartrés et désinfectés en vue d'être réutilisés avec la cartouche filtrante de rechange. Lors de l'élimination des pièces métalliques, veillez à ce qu'elles soient correctement recyclées, conformément aux règles en vigueur au niveau local.

## Tolérance aux désinfectants pour réseaux d'eau

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants courants pour les réseaux d'eau. Ce résultat a été validé par des tests d'intégrité des filtres après exposition aux désinfectants suivants, aux concentrations et pour la durée de contact indiquées:

- Dioxyde de chlore à 30 ppm associé à 200 mg/L de matières en suspension, en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 30 ppm de peroxyde d'hydrogène en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 15 ppm de chlore libre en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm d'ozone en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm de chloramine en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 1000 ppm de chlore libre lors d'un traitement de choc d'une heure
- 50 ppm d'acide hypochloreux (HOCl) lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 50 ppm de dioxyde de chlore lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 3500 ppm de peroxyde d'hydrogène lors d'un traitement de choc de 6 heures
- 3000 ppm de peroxyde d'hydrogène stabilisé à l'argent lors d'un traitement de choc de 14 heures
- solution aqueuse à pH 12 lors d'un traitement de choc d'une heure
- 1000 ppm d'acide peracétique à 60 °C lors d'un traitement de choc de 2 heures

# Précautions d'utilisation

---

- N'utilisez pas le filtre si l'emballage est ouvert ou abîmé ou si le filtre présente des dommages visibles
- Ne déconnectez pas le filtre pendant la période d'utilisation
- Évitez les chocs mécaniques et ne heurtez pas le filtre avec des objets lourds ou métalliques, au risque de l'endommager
- L'embout du filtre ne doit pas entrer en contact direct avec la peau ou les cheveux
- Le filtre ne doit pas être utilisé en permanence avec de l'eau à plus de 60 °C. La plage de température optimale en fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C
- Le filtre n'est pas conçu pour supporter une pression supérieure à 5 bars
- Si le filtre est soumis à une pression d'eau trop élevée, il risque de se casser (diminution soudaine du débit d'eau). Le filtre doit alors être jeté
- Le filtre n'est pas compatible avec le « rétrolavage »
- Le niveau de contamination et la quantité de particules et de substances présentes dans l'eau qui sont susceptibles de bloquer le filtre risquent de diminuer la durée de vie de ce dernier
- Le filtre ne doit pas être rincé ou nettoyé au lave-vaisselle ou dans un autoclave
- Le filtre doit être jeté si la date d'expiration est dépassée
- Ne modifiez ni le filtre ni l'adaptateur et n'effectuez aucun changement dessus
- Important : Le filtre ne peut pas être placé dans un bain d'eau chaude

## Remarque

- N'utilisez pas l'eau pour des lentilles de contact
- La qualité de l'eau ne convient pas à une utilisation pharmaceutique
- Le filtre n'altère pas le goût, l'odeur ou la composition chimique de l'eau et ne modifie pas la concentration en sels, métaux, tartre, produits chimiques, pesticides et colorants

*Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de coquilles.*



**T-safe A/S**

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

**+45 48 17 22 82**

**info@t-safe.com**

**t-safe.com**