



Instructions d'utilisation FR

Filtres Douche Pro



Description

Le filtre de la gamme T-safe Pro Water Filtration utilise la technologie à fibres creuses et a été spécialement conçu pour éliminer les bactéries présentes dans l'eau du robinet, dont la *Pseudomonas aeruginosa* et la *Legionella pneumophila*, afin d'éviter les maladies causées par des infections dans les hôpitaux et les centres de soins.

Les Filtres Douche Pro T-safe sont équipés d'un filetage mâle de ½". Les filtres sont fournis avec un régulateur de débit d'eau, qui protège les filtres contre les brusques pics de pression d'eau.


Les Filtres Douche Pro T-safe permet de retenir efficacement les bactéries jusqu'à 92 jours maximum, dans les limites d'utilisation décrites ici.

Les présentes instructions couvrent les produits suivants

Référence	Code
Filtre Douche Chromé	02-803102
	02-803129
Filtre Douche Blanc	02-803103
Filtre Douche d'urgence	02-803112
	02-803130
Filtre de Remplacement	02-000077
	02-000259


Installation

1

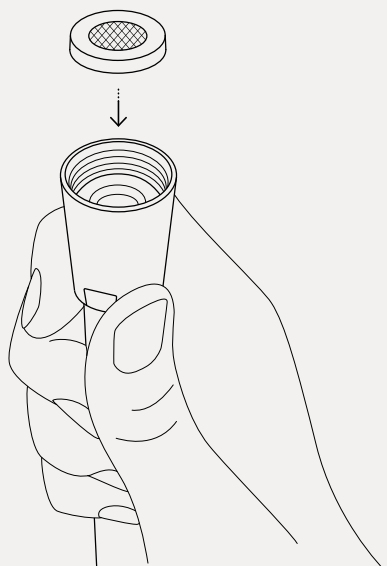

Le joint fourni est prévu pour le tuyau de la douche et doit remplacer le joint précédemment installé, et ce, chaque fois qu'un nouveau filtre T-safe est installé, afin que le raccord soit bien serré.


2

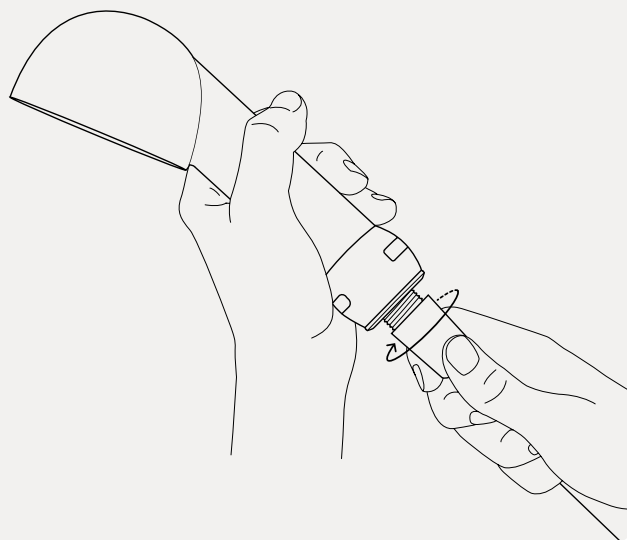


Attachez solidement le tuyau de la douche au Filtre Douche.

Installation du filtre de remplacement

Installez le produit pris directement dans son emballage et assurez-vous que le filtre n'entre en contact avec aucune source de contamination avant son installation.

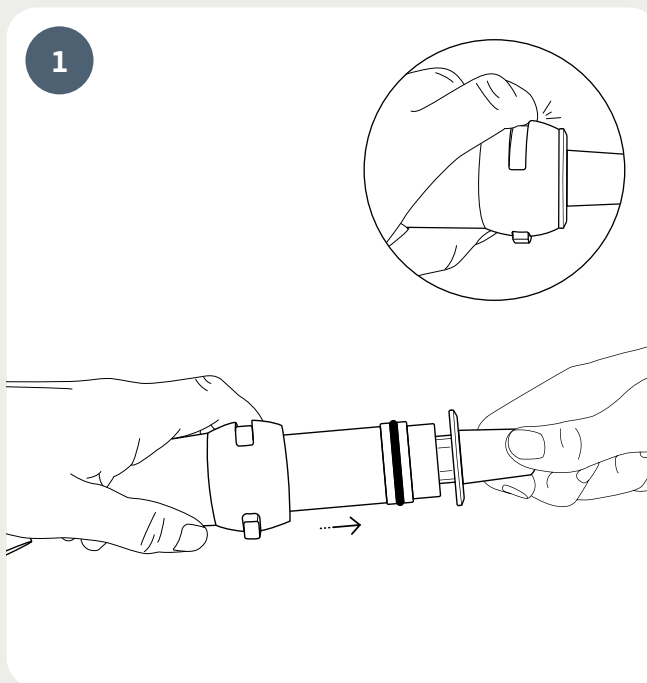


Déverrouillez le filtre en appuyant vers le bas sur le loquet de verrouillage situé sur la poignée. Retirez ensuite le filtre de la poignée.

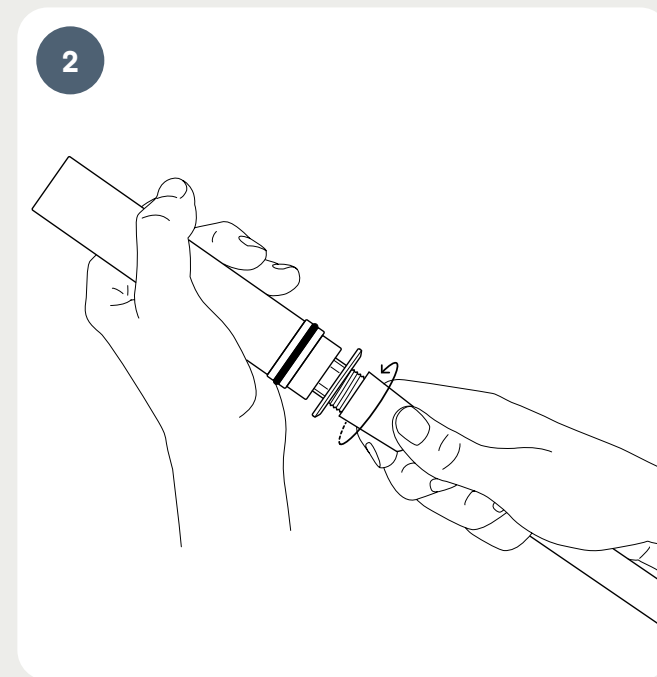


Dévissez le flexible de douche du filtre.

3

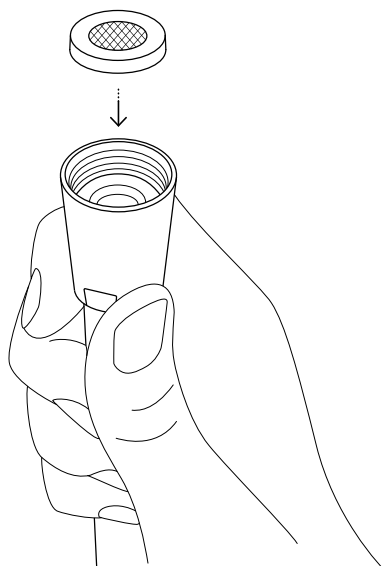


Le joint fourni est prévu pour le tuyau de la douche et doit remplacer le joint précédemment installé, et ce, chaque fois qu'un nouveau filtre T-safe est installé, afin que le raccord soit bien serré.

4

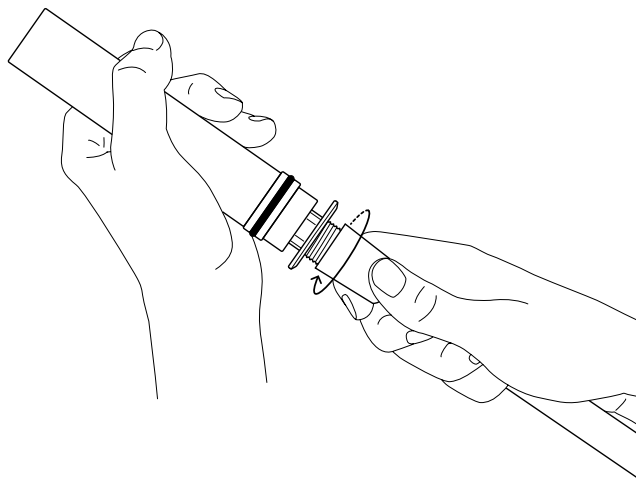


Attachez solidement le tuyau de la douche au filtre.

5

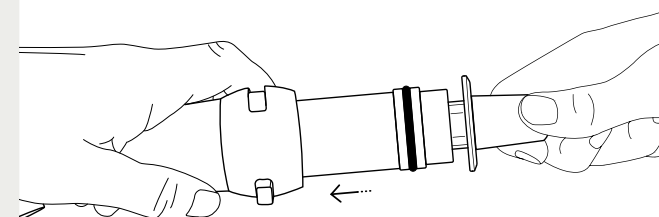

Insérez le filtre dans la poignée.

6

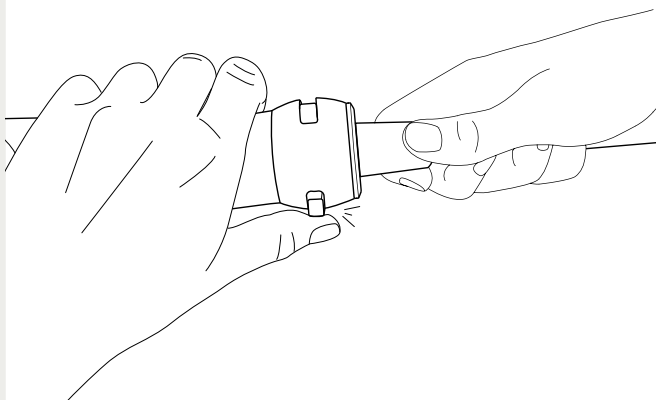

Une fois le filtre correctement positionné dans la poignée, repoussez le loquet de verrouillage dans sa position initiale. Le filtre est maintenant solidement fixé à la poignée. Le filtre de douche est prêt à l'emploi.

Information

Nettoyage et désinfection des surfaces

Si des procédures de nettoyage professionnel sont en place, les surfaces extérieures du filtre doivent être nettoyées à l'aide d'une lingette jetable neuve avec, par exemple. Veillez à ne contaminer aucun embout du filtre, afin d'éviter toute contamination. Ne déconnectez pas le filtre pendant le nettoyage.

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants de surface et les produits de nettoyage courants, à l'exception des désinfectants à base de chlore, en raison de leur surface chromée.

Pour le nettoyage et la désinfection, le boîtier du filtre peut être immergé dans de l'acide citrique jusqu'à 500 000 ppm.

Rangement – filtre non utilisé

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à une humidité de max. 60 %. Date d'expiration : consultez l'étiquette sur l'emballage ou le marquage sur le produit.

Élimination

La cartouche filtrante et les composants non métalliques peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires, conformément aux réglementations locales en vigueur en vertu du numéro de catégorie de déchets 180104 et conformément à la directive européenne 75/442/CEE.

Tolérance aux désinfectants pour réseaux d'eau

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants courants pour les réseaux d'eau. Ce résultat a été validé par des tests d'intégrité des filtres après exposition aux désinfectants suivants, aux concentrations et pour la durée de contact indiquées:

- Dioxyde de chlore à 30 ppm associé à 200 mg/L de matières en suspension, en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 30 ppm de peroxyde d'hydrogène en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 15 ppm de chlore libre en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm d'ozone en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm de chloramine en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 1000 ppm de chlore libre lors d'un traitement de choc d'une heure
- 50 ppm d'acide hypochloreux (HOCl) lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 50 ppm de dioxyde de chlore lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 3500 ppm de peroxyde d'hydrogène lors d'un traitement de choc de 6 heures
- 3000 ppm de peroxyde d'hydrogène stabilisé à l'argent lors d'un traitement de choc de 14 heures
- solution aqueuse à pH 12 lors d'un traitement de choc d'une heure
- 1000 ppm d'acide peracétique à 60 °C lors d'un traitement de choc de 2 heures

Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas le filtre si l'emballage est ouvert ou abîmé ou si le filtre présente des dommages visibles
- Ne déconnectez pas le filtre pendant la période d'utilisation
- Évitez les chocs mécaniques et ne heurtez pas le filtre avec des objets lourds ou métalliques, au risque de l'endommager
- L'embout du filtre ne doit pas entrer en contact direct avec la peau ou les cheveux
- Le filtre ne doit pas être utilisé en permanence avec de l'eau à plus de 60 °C. La plage de température optimale en fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C
- Le filtre n'est pas conçu pour supporter une pression supérieure à 5 bars
- Si le filtre est soumis à une pression d'eau trop élevée, il risque de se casser (diminution soudaine du débit d'eau). Le filtre doit alors être jeté
- Le filtre n'est pas compatible avec le « rétrolavage »
- Le niveau de contamination et la quantité de particules et de substances présentes dans l'eau qui sont susceptibles de bloquer le filtre risquent de diminuer la durée de vie de ce dernier
- Le filtre ne doit pas être rincé ou nettoyé au lave-vaisselle ou dans un autoclave
- Le filtre doit être jeté si la date d'expiration est dépassée
- Ne modifiez ni le filtre ni l'adaptateur et n'effectuez aucun changement dessus
- Important : Le filtre ne peut pas être placé dans un bain d'eau chaude

Remarque

- N'utilisez pas l'eau pour des lentilles de contact
- La qualité de l'eau ne convient pas à une utilisation pharmaceutique
- Le filtre n'altère pas le goût, l'odeur ou la composition chimique de l'eau et ne modifie pas la concentration en sels, métaux, tartre, produits chimiques, pesticides et colorants

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de coquilles.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com